

MADE IN ITALY

MAGIC CARE®

Il vero benessere  
*Healthcare at Home*

Mr Beetle

Mr Beetle ti aiuterà a respirare meglio  
*Mr Beetle will help you breathe more easily*

● Sistema completo per aerosol terapia pediatrica  
*Complete system for paediatric aerosol therapy*

● Massima efficacia terapeutica  
in tutto il tratto respiratorio  
*For the best therapeutic efficacy  
on the entire respiratory tract*

● Ampolla brevettata con antirovesciamento  
e 2 velocità, micronizzazione  
testata TÜV (EN 13544-1)  
*Patented nebuliser with non-spill system  
and 2 speeds, particle size tested  
by TÜV (EN 13544-1)*



## Caratteristiche tecniche di nebulizzazione Nebulisation technical features

### Ampolla RF6 basic<sup>2</sup> / RF6 basic<sup>2</sup> nebuliser

	Con tappo With Cap <b>STANDARD MODE</b>	Senza tappo Without Cap <b>"HIGH SPEED" MODE</b>	
<b>Erogazione Max</b> Max delivery	<b>0,25 ml/min</b> (approx) 0.25 ml/min (approx)	<b>0,32 ml/min</b> (approx) 0.32 ml/min (approx)	
<b>MMAD</b>	<b>3,8 µm</b> 3.8 µm	<b>4 µm</b>	Caratterizzazione in vitro eseguita presso Inamed Research GmbH & Co. KG per conto di TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in conformità al nuovo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia, Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta. <i>In vitro testing carried out at the Inamed Research GmbH &amp; Co. KG on behalf of TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Germany in compliance with the new European Standard for aerosol therapy appliance and Standard EN 13544-1. Further details available on request.</i>
<b>Frazione respirabile &lt; 5 µm</b> Breathable fraction < 5 µm (FPF)	<b>62%</b>	<b>63%</b>	
<b>Capacità massima</b> Maximum fill volume	<b>8 ml</b>		

## Caratteristiche tecniche Technical features

### Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione) Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)

<b>Alimentazione/Potenza:</b> Power supply/Power:	<b>230 V ~ 50 Hz/130 VA</b> Other voltages available on request
<b>Filtraggio aria:</b> Air filtering:	<b>Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm)</b> For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm)
<b>Portata aria al compressore:</b> Compressor air output:	<b>9 l/min (approx.)</b>
<b>Pressione Max:</b> Max pressure:	<b>1,5 bar (approx.)</b> 1.5 bar (approx.)
<b>Rumorosità (a 1 m):</b> Sound level (at 1 m):	<b>55 dB (A) (approx.)</b>
<b>Dimensioni:</b> Dimensions:	<b>21 (L) x 16 (P) x 12 (H) cm</b> 16 (length) x 20 (width) x 12 (height) cm.
<b>Peso apparecchio:</b> Handset Weight :	<b>1,73 Kg</b> 1.73 Kg
<b>Conforme alla direttiva 93/42 CEE</b> (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): In compliance with Dir. 93/42/EEC (for the 230 V ~ 50 Hz unit only):	 0051
<b>Omologazioni:</b> Approvals:	 (Type P0406EM F400)
<b>Garanzia:</b> Warranty:	<b>2 ANNI</b> Please refer to your local dealer

**MR.  
BEETLE**

**Codice**  
Code **CO08P00**

**Imballo**  
Master carton **n° 8 Pz**  
8 pieces



Maggiori informazioni sui prodotti Magic Care sono disponibili consultando la nostra rete vendita o visitando il sito internet [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)  
For further information on Magic Care products please contact our sales network or visit our website [www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)

**MAGIC CARE**

è un marchio registrato di proprietà di  
**FLAEM NUOVA S.p.A**  
Via Colli Storici, 221-223-225  
25010 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)  
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287  
E-mail: [info@flaemnuova.it](mailto:info@flaemnuova.it)  
[www.flaemnuova.it](http://www.flaemnuova.it)



**FLAEM NUOVA S.p.A.** è un'azienda  
con sistema di qualità certificato  
Company with certified quality system

## Ampolla a 2 velocità / 2 speeds nebulizer

### Modalità Standard


Inspirazione con tappo  
per una erogazione  
ottimale ed una minima  
dispersione di farmaco



**Standard mode**  
Inspiration with cap for  
a best delivery and reduced  
dispersion of the nebulised  
medication

### Modalità "High Speed"

Inspirazione senza  
tappo per una più  
rapida applicazione

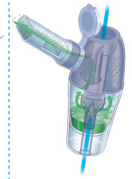

**"High Speed" mode**  
Inspiration without cap  
for a faster application

## Sistema antirovesciamento / Non-spill system



L'ampolla RF6 basic<sup>2</sup> è indicata anche per l'uso pediatrico, poiché il sistema antirovesciamento di cui è dotata impedisce la fuoriuscita del farmaco anche in caso di totale capovolgimento accidentale dell'ampolla.  
The RF6 basic<sup>2</sup> nebuliser is also suitable for pediatric use, since the non-spill system prevents medication from spilling out even if the nebuliser is accidentally tipped over.

## Dotazione accessori / Accessories contents



1. **Apparecchio / Unit**
2. **Kit Ampolla RF6 basic<sup>2</sup> completo di Bocchaglio, Mascherina adulto, Mascherina pediatrica**  
RF6 basic<sup>2</sup> nebuliser Kit complete with mouthpiece, Adult and Child mask
3. **Tubo di collegamento / Connection tube**
4. **Borsello / Carry bag**



Export Department of FLAEM NUOVA

**medexpo  
international** s.r.l.

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy  
Phone (39) 02 4120769 - Fax (39) 02 48376295  
E-mail: [info@medexpointernational.com](mailto:info@medexpointernational.com)